



# ラクラックス®

## ローリングシステムについて

# TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions

### ●抱き上げないで寝たまま「らくらく」快適移動

抱き上げない介助をサポートするための移乗用スライドシートです。テイジンが開発した滑り良い2つの素材を組み合わせることで実現しました。抱き上げは介護する方の著しい負担となるばかりではなく、介護を受ける方にとっても危険です。ラクラックスは安全で快適な介護現場の実現になくてはならない必需品です。



### ●操作簡単、体位変換もスムーズ


ローリングするシート地がスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で「らく」に移動や体位変換をすることが可能です。ベッドの上だけではなく、ベッドからストレッチャーへの移動や車椅子への移乗、入浴の際など様々なシーンでご使用いただけるように各種仕様を取り揃えております。



### ●ラクラックス®の特長

- 芯材には高機能クッション材「エルク®」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます。(M64RK11、12、13は除く)
- マット内の芯材(ボード)により少しの間隔があってもスムーズな移乗が可能になります。
- 装着したまま、レントゲン撮影が可能です。(芯材のボードを外してください。)
- 持ち運びに便利な収納袋付き。(M64RK01、11、12、13は除く)


ユニット断面図

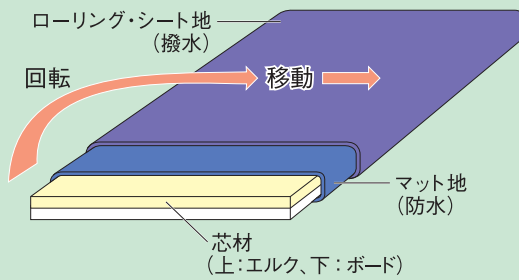

### ●素材

ローリング・シート地	ポリエステル 100%	帯電防止素材 テイジンのセルガード®使用	
マット地			
収納袋			
芯材	エルク®	複合繊維(ポリエステル)100%	高性能クッション材 テイジンのエルク®使用
	ボード	ポリプロピレン 100%	パロニア(独立気泡構造)

※帝人フロンティア独自の防汚加工により、汚れが付きにくく洗濯耐久性にも優れております。マットを洗濯する際は、芯材(エルク、ボード)を外してください。芯材は洗濯不可です。芯材の汚れ気になる場合は水洗いの上、陰干しで完全に乾燥させてから本体に挿入してください。芯材は直射日光にあたりると劣化しますので、ご注意ください。

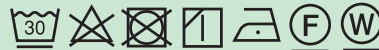

## 安全にご使用いただくために ※必ずお読みください

<b>警告</b>	誤った取り扱いをすると死亡や重症を負う重大な転落・転倒事故が発生する危険性があります。	<b>注意</b>	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、本品が破損する可能性があります。
●移乗、介護補助以外の用途には使用しないでください。	●使用後は速やかに本品の抜き取りをお願いします。本品を敷いたままストレッチャーや車いす等で移動したり、ベッドに敷いたままにするのはお避けください。転落の危険があります。	●ご使用前に、本品に破損がないかご確認ください。繰り返しのご使用でボードの折り目に亀裂が認められる場合は、交換時期となります。	●大きく段差をつけて本品を使用すると危険な上、本品のボードの折り目が裂ける原因となりますのでご注意ください。
●ベッドからストレッチャーなど別のものに移動する際は、双方のストッパーが確実に働いていることを確認し、段差や隙間が出るだけ生じないようにしてください。	●本品を橋渡し状態にして体重を支えることは出来ません。特にボードが劣化している場合は重大事故につながりますので、お避けください。	●マット、シートを単独で使用しないでください。また、指定芯材以外は入れないでください。	●ローリングシートとマットの間には何も入れないでください。
●臥位での移乗の際は腕の巻き込みにご注意ください。可能であれば対象者の両手のひらをおへその上に乗せてください。	●M64RK14ラクラックス®スライドユニットについている取っ手は移乗時にスライドさせるための持ち手ですので、本品に人を乗せて持ち上げたり担架としてのご使用はお避けください。	●火気を近づけないでください。引火する場合があります。	●浴室内での保管はカビの原因となりますので、お避けください。
●危険と感じた場合は無理をせず、ご使用を中止してください。		●小さなお子様がいたずらしないようにご注意ください。	

- 素材提供 帝人フロンティア株式会社
- お取扱い店 株式会社 帝健 (一般社団法人日本ノーリフト協会 賛助企業)

株式会社 帝健 (一般社団法人日本ノーリフト協会 賛助企業)

製造発売元

株式会社 帝健 (一般社団法人日本ノーリフト協会 賛助企業)


〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエスト  
TEL. 06-6233-3565 FAX. 06-6233-5108

●日本製

## 寝たままらくらく、快適移動



# ラクラックス®

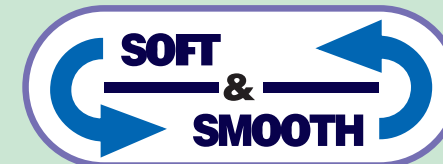

## 介護保険給付対象福祉用具 (体位変換用シート)






# ラクラックス® M64RKシリーズ




## ● ベッドのずり落ち戻し

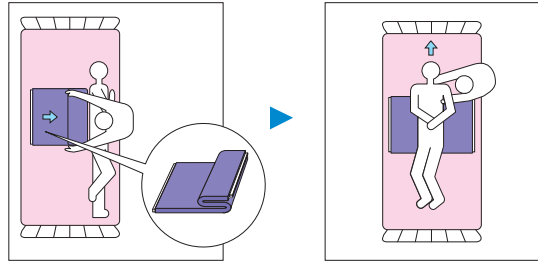

ラクラックス® **ミニ・ミニ**  
M64RK01  
(シート撥水×マット防水)  
52×52cm

本体価格 17,160円 (税抜15,600円)

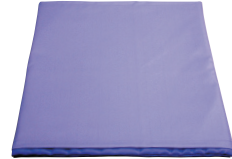

※ボードなし、クッション材入り

TAISコード 分類コード: 123306  
用具コード: 00238-000003

座位でのベッド上の移動に

ラクラックス® **ミニ**  
M64RK02  
(シート撥水×マット防水)  
80×62cm  
(2つ折り収納袋入)

本体価格 28,160円 (税抜25,600円)




※ボードなし、クッション材入り

TAISコード 分類コード: 123306  
用具コード: 00238-000006

ベッド上での移動・体位変換に


## ● ベッドからストレッチャーへの移動

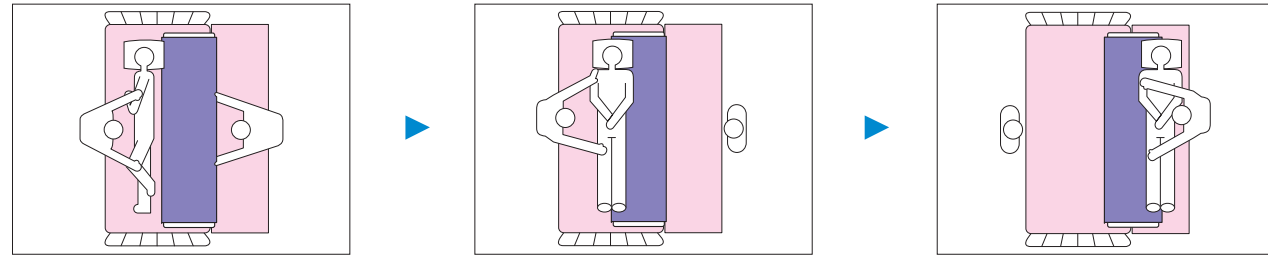

ラクラックス® **レギュラー**  
M64RK05  
(シート撥水×マット防水)

180×55cm  
(3つ折り収納袋入)

本体価格 55,000円 (税抜50,000円)

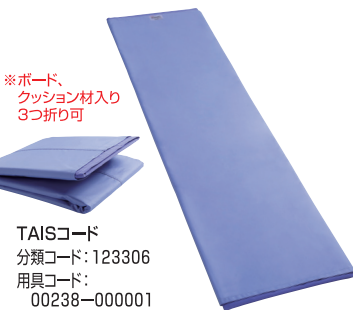

※ボード、クッション材入り  
3つ折り可

TAISコード  
分類コード: 123306  
用具コード:  
00238-000001

ベッドからストレッチャーへの移動

ラクラックス® **ラージ**  
M64RK07  
(シート撥水×マット防水)

180×72cm  
(3つ折り収納袋入)

本体価格 66,000円 (税抜60,000円)



※ボードなし、クッション材入り

TAISコード  
分類コード: 123306  
用具コード:  
00238-000004

寝たまま長い距離を移動

ラクラックス® **ミニ・ロングレスキュー**  
M64RK09  
(シート撥水×マット防水)

120×40cm  
(2つ折り収納袋入)

本体価格 35,640円 (税抜32,400円)




※ボード、クッション材入り  
2つ折り・3つ折り可

TAISコード  
分類コード: 123306  
用具コード:  
00238-000010

寝たまま狭い場所での移動


## ■ 概念図

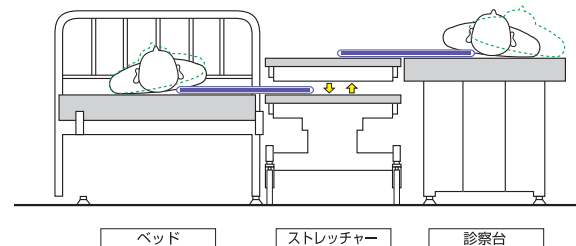

**豆知識** 移動距離は概ね、ラクラックス® 幅の2倍とお考え下さい。介護者の方がご自身の体重を預けるようにすると、楽に移乗が可能です。

# ラクラックス® システム使用例

## ● 座位のままでの移乗 (※ある程度自力で移乗可能な方が対象)

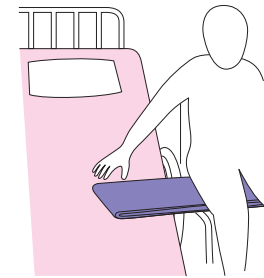

※自力で端座位が取れる方、下肢に体重をかけることができる方、座位のまま体重移動ができる方が対象です。

ラクラックス® **タイプ・I**  
M64RK11  
(シート撥水×マット防水)

33×58cm

本体価格 17,820円 (税抜16,200円)



※ボード2枚入り、クッション材なし

TAISコード  
分類コード: 123306  
用具コード: 00238-000005

座位で長い距離の移動に

ラクラックス® **ミニ・座**  
M64RK12  
(シート撥水×マット防水)

33×42cm

本体価格 15,180円 (税抜13,800円)



※ボード入り、クッション材なし

TAISコード  
分類コード: 123306  
用具コード: 00238-000007

ベッドから車椅子への移動等に

ラクラックス® **ポータブル**  
M64RK13  
(シート撥水×マット防水)

33×31cm

本体価格 13,860円 (税抜12,600円)



※ボード入り、クッション材なし

TAISコード  
分類コード: 123306  
用具コード: 00238-000011


さらに狭い場所での移動に

## ● 座位での移乗方法

臀部片側を上げていただき、対象者の下にラクラックス® をさしこみます。対象者にはラクラックス® 側(移乗方向)に脚を一步出して体重をその下肢片側に預けていただき(体重移動)、スライドさせます。

この際、対象者の移乗方向と逆側の脚を一步前に出して踏ん張っていただき、その脚に体重を乗せるように前屈していただくこと自然に臀部が浮きます。

臀部が反対側に着地したら、再度抜き取る側と逆の脚を踏ん張り、前屈して臀部片側を持ち上げ本品を抜き取ってください。

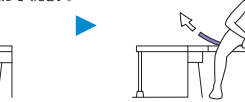


## ● 介助の一例

お尻を浮かせるため対象者に前屈姿勢を取っていただく際に、介助者は膝をついて変えとなります。


移乗の際に対象者の腰を押してサポートします。



## ● 自動車へのトランスファー使用例 (タイプ・I)

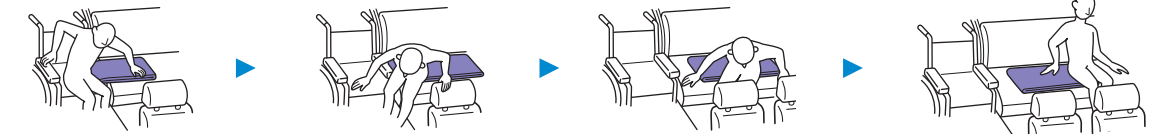

## ● スライド・ユニットの使用例

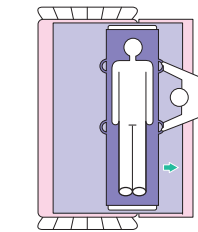

スライドシステムについてはシートの上をマットがスライドします。

ラクラックス® **スライド・ユニット**  
M64RK14  
(シート撥水×マット防水)

180×40cm  
(3つ折り収納袋入)

本体価格 70,950円 (税抜64,500円)

TAISコード  
分類コード: 123306  
用具コード: 00238-000008

スライドシステム、移動距離最大



※ボードなし、クッション材入り

## ● 製品仕様

● 日本製

● 仕様は商品改良のため、予告なく変更される場合がありますが、ご了承ください。

型式	製品名	サイズ(cm) 長さ×巾	標準価格 本体価格	重量	構成内容				収納袋
					シート	マット	芯材 エルク®	ボード	
M64RK01	ミニ・ミニ	52×52	17,160円 (税抜15,600円)	475g	●	●	●	—	—
M64RK02	ミニ	80×62	28,160円 (税抜25,600円)	1,060g	●	●	●	—	●
M64RK05	レギュラー (シートのみ) (ボードのみ)	180×55	55,000円 (税抜50,000円) 17,820円 (税抜16,200円) 7,700円 (税抜7,000円)	3,410g	●	●	●	●	●
M64RK07	ラージ (シートのみ)	180×72	66,000円 (税抜60,000円) 22,000円 (税抜20,000円)	2,400g	●	●	●	—	●
M64RK09	ミニ・ロングレスキュー (シートのみ) (ボードのみ)	120×40	35,640円 (税抜32,400円) 13,750円 (税抜12,500円) 5,940円 (税抜5,400円)	1,765g	●	●	●	●	●
M64RK11	タイプ・I	33×58	17,820円 (税抜16,200円)	1,120g	●	●	—	● ボード2枚	—
M64RK12	ミニ・座	33×42	15,180円 (税抜13,800円)	460g	●	●	—	●	—
M64RK13	ポータブル	33×31	13,860円 (税抜12,600円)	290g	●	●	—	●	—
M64RK14	スライド・ユニット	180×40 184×110	70,950円 (税抜64,500円)	2,160g	● シート2枚	●	●	—	●

( )の商品は交換用に別売りしております。※マットとクッション材の別売りはしていません。ボードとシートの組み合わせでは完成品となりません。